

GUÍA PARA TOMA DE MUESTRAS

ESPERMATOLOGÍA

Los estudios espermatoológicos requieren que las pajuelas de semen sean conservadas de forma rigurosa para que los resultados tengan un valor real. También es importante respetar el número adecuado de pajuelas que se deben remitir para cada estudio.

- Para un espermograma completo se recomienda enviar como mínimo 4 pajuelas.
- El envío de pajuelas debe ser siempre en nitrógeno líquido, indicando correctamente en qué posición se encuentran las pajuelas dentro del termo.
- Si además se solicitan estudios microbiológicos se debe tener en cuenta que se necesitarán más pajuelas:
 - Para cultivo e identificación de bacterias: una pajueta adicional.
 - Para recuento de bacterias (UFC/ml): dos pajuelas adicionales.
 - Para cultivo e identificación de virus: una pajueta adicional.
- Para estudios microbiológicos las pajuelas pueden ser remitidas congeladas o refrigeradas.