

GUÍA PARA TOMA DE MUESTRAS

RASPAJE DE PIEL PARA OBSERVACIÓN DE ÁCAROS

Los animales domésticos son susceptibles a una amplia gama de parasitosis externas. Un paso fundamental para diagnosticarlas o descartarlas es evidenciar el agente actuante, y muchas veces sólo puede hacerse a través de la observación microscópica.

Para realizar una buena toma de muestras sugerimos el siguiente procedimiento:

1. Dejar caer las costras y pelos sueltos dentro de un envase con tapa a rosca. Pueden utilizarse los recipientes estériles para recolección de orina.
2. Raspar la piel de la zona afectada con una hoja de bisturí estéril hasta puntillado hemorrágico. Puede usarse vaselina para lograr que el material se adhiera a la hoja de bisturí.
3. Colocar el material obtenido sobre uno o varios portaobjetos, haciendo luego un extendido. Dejar secar al aire.
4. Remitir al Laboratorio (no es necesario refrigerar).